



knfbReader Mobile  
en  
kReader Mobile

# Installatie Instructies

Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken  
of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren.

RL032608/S1

Vertaling door Sensotec NV/SA

## **MOBILE READER INSTALLATIE INSTRUCTIES**

Opmerking: Bij aankoop van een mobiele telefoon waarop de Mobile Reader reeds geïnstalleerd is, dient u onderstaande stappen niet uit te voeren. Dit document beschrijft hoe u de Mobile Reader software installeert op een mobiele telefoon, hoe u de telefoon configureert, en hoe u de Mobile Reader software kunt registreren en activeren.

De meest recente software, instructies en informatie kunt u steeds terugvinden op [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu).

### **1. OVERZICHT VAN DE MOBILE READER INSTALLATIE:**

Bij installatie van de Mobile Reader heeft u het volgende nodig:

- Een functionerende Nokia N82 (of ander compatibel model).
- Een PC met Internet toegang voor de activatie van de Reader.
- De Nokia USB kabel, die werd meegeleverd bij de telefoon, om uw telefoon met uw PC te verbinden.
- Het Mobile Reader software pakket, met inbegrip van de verpakkingsdoos en alle inhoud.

De installatie van uw Mobile Reader omvat volgende stappen:

- Het configureren van de camera / mobiele telefoon.
- Een verbinding tussen telefoon en PC opzetten – om de Reader software te installeren.
- Het installeren van de Mobile Reader software.
- Het activeren van de Mobile Reader software aan de hand van de website.

### **2. HET CONFIGUREREN VAN DE CAMERA / MOBIELE TELEFOON**

Deze configuratie instellingen zijn specifiek voor de Nokia N82.

Opmerking: het is vereist om de de tijd, tijdzone en datum accuraat in te stellen (tot op de minuut).

Ga naar stap 2.2, indien uw telefoon reeds op voorhand aangezet en ingesteld werd.

#### **2.1 INSTRUCTIES VOOR EEN GLOEDNIEUWE TELEFOON**

1. Plaats de batterij zoals aangegeven in de Nokia handleiding.
2. Schakel de telefoon in.

3. Volg de instructies op de telefoon om de tijd, tijdzone en datum in te stellen.

## **2.2 BIJKOMENDE CONFIGURATIES**

### **2.2.1. Telefoontoetsen die van belang zijn bij de configuratie van uw telefoon:**

De "Linker Selectie Toets", is het bovenste gedeelte van de grote, platte, vierkante toets, aan de linkerkant van de centrale kanteltoets.

De "Menu toets" is het onderste deel van de grote, platte, vierkante toets, aan de linkerkant van de centrale kanteltoets.

De "Rechter Selectie Toets", is het bovenste gedeelte van de grote, platte, vierkante toets, aan de rechterkant van de centrale kanteltoets.

### **2.2.2. Belangrijke stappen in de telefoon configuratie:**

1. Vereist: Verzekert u er van dat de tijd correct is ingesteld.  
Ga naar Menu > Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Datum en Tijd.
  - Stel de Tijd in.
  - Stel de Tijdzone in.
  - Stel de Datum in.
2. Advies: Schakel de automatische toetsenbordvergrendeling uit.  
Opmerking: Het toetsenbord zal niet blokkeren terwijl de Reader software actief is. Het is aangeraden om de toetsenbordvergrendeling uit te schakelen, aangezien de Nokia N82 standaard ingesteld is om de toetsen na 30 seconden te vergrendelen. Dit wordt niet via een geluidssignaal kenbaar gemaakt, tenzij er schermuitleessoftware op uw telefoon geïnstalleerd staat.  
Om de toetsenbordvergrendeling uit te schakelen, ga naar:  
Menu > Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM kaart > Periode automatisch blokkeren toetsenbord: geen.
3. Advies: Selecteer een maximale time-out waarna de verlichting van het telefoonscherm wordt uitgeschakeld.  
Ga naar Menu > Instrumenten > Instellingen > Persoonlijk >

Scherm.

- Time-Out Spaarstand. Druk op Rechts om de maximale time-out in te stellen.
  - Time-Out Verlichting. Druk op Rechts om de maximale time-out in te stellen.
4. De polarisatoren, die bij uw Mobile Reader werden meegeleverd, zijn optische polariserende filters die de glans van een reflecterend oppervlakte reduceren, met inbegrip van glanzend papier. De glans van de flits van de camera kan de tekst witwassen en zodoende onleesbaar maken. Gelieve ervoor te zorgen dat de polarisatoren correct geïnstalleerd zijn om de beste resultaten te behalen.  
Raadpleeg de "Polarisator" envelop die bij uw Reader software pakket werd meegeleverd.
  5. Volg stap voor stap de instructies uit de Polarisator envelop om de polarisatoren te installeren (ook beschikbaar op de software CD).

### **3. STEL DE VERBINDING TUSSEN UW TELEFOON EN PC IN:**

Om de Reader software van de CD naar de telefoon te installeren, moet de PC in staat zijn om te communiceren met de Nokia telefoon. Nokia voorziet gratis communicatie software voor zijn telefoons. U dient deze stap slechts eenmaal te doorlopen voor elke PC die u zal gebruiken.

1. De Nokia NSeries PC Suite software wordt geleverd bij uw telefoon. De Engelse versie kan tevens gedownload worden op onderstaande pagina:  
<http://www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download>.

Indien u de Nokia Nseries PC Suite in een andere taal wenst, gaat u naar de Nokia site van uw land en volgt u de koppelingen "Ontvang support en software" en "Software Downloaden".

Er is tevens een toegankelijke Engelse versie beschikbaar. Ga naar [www.blindsea.com](http://www.blindsea.com) en volg volgende links: Mobile Corner > 3rd Edition 3rd-Party Software > Nokia PC Suite

2. Volg de instructies voor het installeren van de Nokia NSeries PC Suite op uw PC.
3. Maak gebruik van de USB kabel om uw telefoon met uw PC te verbinden.

4. Op uw telefoon zullen enkele verbindingsmogelijkheden verschijnen. Kies "PC Suite". Na enkele seconden, zal de PC een geluid produceren die er op wijst dat de verbinding geslaagd is.

Opmerking: "Synchronisatie" met PC Suite is niet vereist om de Reader software te installeren.

#### **4. DE MOBILE READER SOFTWARE INSTALLEREN:**

1. Plaats de Reader Software CD-ROM in uw PC (of download de installatie bestanden op [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu)).

2. Voer het serienummer in.

3. Installeer eerst de "KNFB Mobile Reader Toepassing".

Volg de instructies op uw PC scherm; op een bepaald ogenblik zal men u er op wijzen om de installatie van op het telefoonscherm verder te zetten.

Opmerking: Het is mogelijk dat u de keuze krijgt om op het telefoongeheugen of het geheugenkaartje te installeren. **WIJ RADEN U AAN OM DE INSTALLATIE OP HET TELEFOONGEHEUGEN TE LATEN DOORGAAN OPDAT UW READER IN DIT GEVAL SNELLER ZAL PRESTEREN.**

4. Installeer vervolgens het taalpakket.

Voor het Nederlands en het Nederlands (België), is het uiterst belangrijk om de Reader tussen stap 3 en 4 NIET op te starten.

5. Creëer een snelkoppeling naar uw Reader op het hoofdscherm van uw telefoon:

Ga naar Menu > Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Persoonlijk > Standby-modus > Snelkoppelingen > Linker Selectie Toets. Zoek naar de Reader in de lijst van applicaties.

6. De Reader kan ook vanuit het Menu opgestart worden.

Ga naar Menu > Toepassingen > Reader

#### **5. ACTIVEER DE MOBILE READER**

Bij het eerste gebruik van de Reader, zal u gevraagd worden om enkele beslissingen en keuzes te maken. U kan de Reader op elk ogenblik tijdens dit proces stopzetten, en het proces op een later ogenblik verder zetten. Wanneer u het product niet activeert, blijft de Reader actief maar met beperkte functionaliteit.

## **5.1 BEGIN HET ACTIVERINGSPROCES OP UW READER:**

Om de Reader te activeren, voert u volgende stappen uit:

1. Start de Reader toepassing. Wanneer u geen snelkoppeling heeft aangemaakt, gaat u naar Menu > Toepassingen. Zoek naar Reader.
2. Product Selectie: U zal een boodschap horen die u vraagt om een keuze te maken tussen het kReader (nummer 1) of het knfbReader (nummer 3) product. Maak uw keuze.
3. Licentieovereenkomst: U zal een boodschap horen die u vraagt of u al dan niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst is beschikbaar in gedrukt formaat, elektronisch formaat op de CD-ROM, en in de Documentatie Explorer van de Reader zelf. U dient akkoord te gaan, door op 1 te drukken, met de overeenkomst om verder te gaan. Indien u niet akkoord gaat, drukt u op 3.
4. Productactivering: de Reader vraagt u om een activeringscode in te voeren, of om op Onder te drukken voor meer informatie. Druk op Onder.
5. De Reader vermeldt dat u contact dient op te nemen met uw dealer met een nummer, de software code, dat het vervolgens luidop leest. Noteer dit nummer, of laat de Reader verdergaan naar de volgende stap. De Reader vermeldt ook dat drukken op Rechts het nummer herhaalt, je kan het nummer zo vaak herhalen als nodig.

## **5.2 ACTIVERINGSPROCES: WEBSITE**

Ga naar de K-NFB Reader activerings- en registratiewebsite, beschikbaar op [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu). Registratie is gratis.

### **5.2.1. Creëer een nieuwe Account**

1. Ga naar de website [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu).
2. Volg de koppelingen knfbReader Mobile > Activatie.
3. Klik op de koppeling "New user".
4. Registreer als gebruiker door uw naam en contactgegevens op te geven. Indien u de Reader voor een derde activeert, geeft u zijn

naam en contactgegevens op.

5. Creëer een gebruikersnaam en paswoord voor de gebruiker.
6. Klik op de knop "Register".

### **5.2.2. Activering**

1. Ga naar de website [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu).
2. Volg de koppelingen knfbReader Mobile > Activatie.
3. Meldt aan door uw gebruikersnaam en paswoord in te geven. Indien u de Reader voor een derde activeert, dient u zijn gebruikersnaam en paswoord in te geven.
4. Voor de activering heeft u twee nummers nodig:
  - De softwarecode (12 cijfers) die zonet luidop uitgesproken werd door uw Reader (zie 5.1)
  - Het serienummer (4 x 3 letters of cijfers) van het product, dat u terug kunt vinden op de productdoos (zowel in zwartschrift als in Braille).
5. Voer het serienummer in.
6. Druk op de knop "Next" om naar de volgende stap te gaan.
7. Optioneel: U krijgt hier de kans om de meest recente software te downloaden.
8. Druk op de knop "Next" om naar de volgende stap te gaan.
6. Voer de softwarecode in.
7. Druk op de knop "Finish" om de activeringscode te bekomen.
8. Voer de activeringscode in op de Reader. Maak hierbij gebruik van het numeriek toetsenbord van uw telefoon, en druk op # om de code te bevestigen.

Belangrijke Opmerking: de codes die tijdens het activeringsproces worden meegedeeld zijn slechts geldig voor een beperkte tijd. Het

activeringsproces (zoals in punt 7.2 omschreven) dient zonder tussenpauzes te worden doorlopen.

## **6. TEST EN TROUBLESHOOTING**

Proficiat! U bent er in geslaagd om de Reader te installeren en te activeren. Het is nu klaar om te lezen.

### **6.2 OEFENPAGINA**

Raadpleeg Hoofdstuk 10 in de handleiding over het gebruik van de oefenpagina en leer de beste afstand en positionering van de Reader boven een standaard A4 pagina.

### **6.3 TROUBLESHOOTING**

#### **6.3.1. De Reader geeft de boodschap “geen tekst” of slechte leesresultaten weer.**

- ❑ Werden de roze plastieken beschermstickers van de polarisatoren verwijderd na installatie?
- ❑ Houdt u de Reader op een afstand van 30 cm van de pagina of tekst?
- ❑ Ga na of de polarisatoren in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar werden geïnstalleerd.

## **7. BIJKOMENDE INFORMATIE**

Bijkomende help en informatie is kan u terugvinden:

- ❑ In de Documentatie Explorer op de Reader zelf (Houdt toets 1 enkele seconden ingedrukt)
- ❑ Op de Audio tutorial CD
- ❑ Op de Software CD (elektronische bestanden)
- ❑ Op [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu)
- ❑ Op [www.knfbReader.com](http://www.knfbReader.com)