

Mobile Reader

Kommando-oversikt

Hjem-Skjerm

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Avslutte	Avslutte applikasjonen.
Tasten 1 / Enter	Bildetaking	Tar et bilde for tekstgjenkjenning og opplesing.
Tasten 2	Filutforsker	Tilgang til lagrede dokumenter og billedfiler for å lese eller slette dem.
Tasten 3	Nylige Dokumenter	Tilgang til nylig viste dokumenter for sletting eller opplesing.
Tasten 4	Innstillinger	Vis, endre, lagre eller gjenopprett brukerinnsstillinger.
Tasten 5	Lisensaktiveringer	Legg til lisensierte funksjoner.
Tasten 6	Hjelp	Tilgang til online-dokumentasjon.
Tasten 9	Om Programmet	Få informasjon om status og versjon.

(Merk: Funksjoner for venstrevalg og høyrevalg kan endres når en meny eller dialog vises.)

Bildetaking-skjermen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Tilbake	Gå tilbake til forrige skjerm.
Tasten 1 / Enter	Opptak og Les	Tar et bilde, behandler bildet for tekst, legger fram og leser opp teksten.
Tasten 2	Synsfeltsrapport	Få en rapport på hvor godt kameraet er posisjonert (knfbReader Mobile).
Tasten 4	Innstillinger	Vis og endre brukerinnsstillinger for Bildetaking.
Tasten 5	Nytt Dokument	Start et nytt dokument.
Tasten 7	Fargegjenkjenning	Bestem den mest fremtredende fargen.
Tasten 0	Gjenkjenne Amerikansk Valuta	Gjenkjenne benevnelsen på en USA-seddel (knfbReader Mobile).
Tasten *	Hjem	Gå tilbake til Hjem-skjermen.

Filutforsker-Skjermen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Tilbake	Naviger til hovedkatalogen. Gå til forrige skjerm hvis du er på rotkatalogen.
Tasten 1	Rotkatalog	Gå til brukerens rotkatalog.
Tasten 2	Åpen	Åpne valgt fil.
Tasten 3	Slette	Slette valgt fil.
Tasten *	Hjem	Gå tilbake til Hjem-skjermen.

Tekstnavigerings-skjermen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Tilbake	Gå tilbake til forrige skjerm.
Tasten 1	Pause / Fortsett Lesing	Pause lesing, eller fortsett lesing fra hvor det sist ble pauset eller avbrutt.
Tasten 2	Begynnelsen av Dokument	Navigér til begynnelsen av dokumentet.
Tasten 3	Innstillinger	Vis eller endre innstillingene for tekstnavigering.
Tasten 4	Oversettelse	Slå oversettelse på eller av.
Tasten 5	Skjerm Opp	Navigér opp med én skjermfull tekst.
Tasten 6	Lagre Filer	Lagre tekstdokumentet eller bildefilen.
Tasten 7	Stav Aktuelt Ord	Stav valgt ord.
Tasten 8	Skjerm Ned	Navigér ned med én skjermfull tekst.
Tasten 9	Behandle Bilde på Nytt	Behandle bildet på nytt i et nytt Leseformat.
Tasten 0	Slutten av Dokument	Navigér til slutten av dokumentet.
Tasten *	Hjem	Gå tilbake til Hjem-skjermen.

Nylige Dokumenter-Skjermen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Avslutte	Avslutte applikasjonen.
Tasten 2	Åpen	Åpne valgt fil.
Tasten *	Hjem	Gå tilbake til Hjem-skjermen.

Lisensaktivering-skjermen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Avslutte	Avslutte applikasjonen.
Tasten 5	Ekstra Språk	Aktiver ekstra språk.
Tasten 9	Lisensaktivering	Aktivere Leser-programvaren.
Tasten *	Hjem	Gå tilbake til Hjem-skjermen.

Dokumentutforsker-skjermen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre Valgtast	Alternativer	Vis meny over kommandovalg.
Høyre Valgtast	Avslutte	Avslutte applikasjonen.
Tasten 2	Åpen	Åpne valgt fil.
Tasten *	Hjem	Gå tilbake til Hjem-skjermen.